

ABRIS Pruebas

Pass (Apto)/Refer (No apto)


La prueba Apto/No apto se usa para una evaluación objetiva de la audición de recién nacidos y bebés de muy corta edad. Esta prueba valora la actividad del tronco cerebral en respuesta a estímulos de tipo clic a un nivel fijo (30, 35 o 40 dB nHL).

El ABRIS interrumpirá el registro cuando detecte una respuesta de «Apto». En caso contrario, seguirá realizando un registro durante toda la duración de la prueba (120 seg.) y presentará un resultado «No apto».


Área de trabajo: Screening

Electrode montage: Traditional 4 electrodes montage, vertex, mastoids, and ground (cheek, low forehead). Alternative 3 electrode montage, vertex, nape, and ground (cheek, low forehead).

Results:

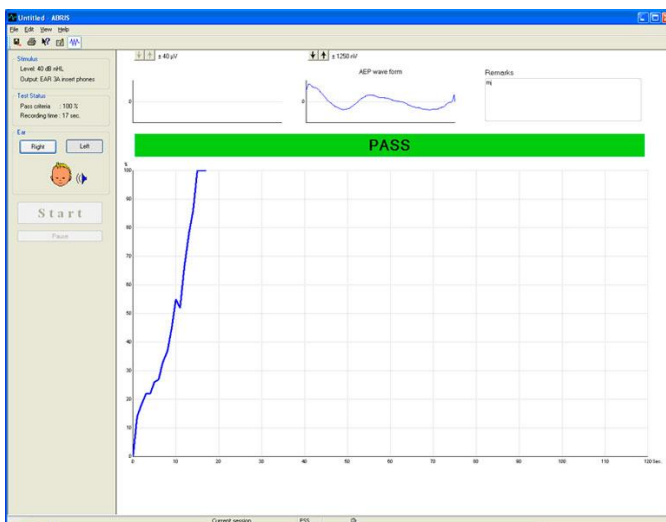

Prueba con resultado «Apto», a 40 dB nHL (también es posible a 30, 35, 40 dB nHL)

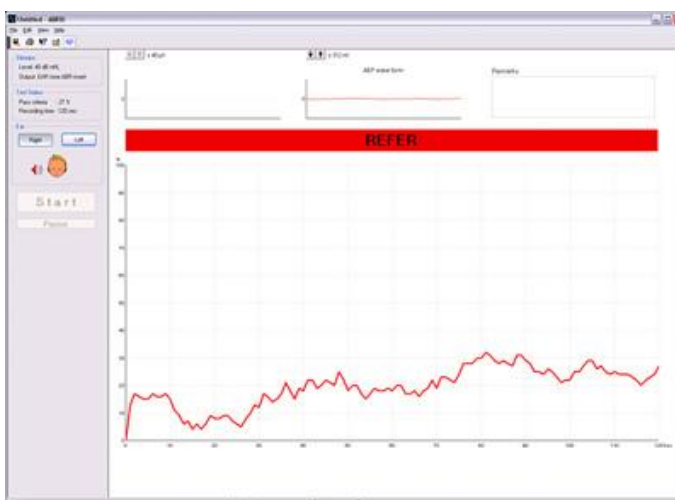

Prueba con resultado «No apto», a 40 dB nHL (también es posible a 30, 35, 40 dB nHL)