

AD229b

Audiómetro de diagnóstico



*No pierda más tiempo
en tareas rutinarias
Céntrese en los resultados*



Interacoustics®

leading diagnostic solutions

AD229b

Audiómetro de diagnóstico

No pierda más tiempo en tareas rutinarias

La gran calidad del AD229b lo convierte en el audiómetro más adecuado para cualquier aplicación, ya sea fija o portátil, en la que se realicen pruebas de diagnóstico vía aérea, ósea y vocal. La prueba automática del umbral auditivo, la cual permite ahorrar tiempo, combinada con la interfaz informática hacen del AD229b un audiómetro ideal para entornos sanitarios modernos. Las funciones de transmisión y recepción vocal facilitan el trabajo con el AD229b, especialmente en instalaciones con cabinas insonorizadas. Finalmente, cabe destacar su total compatibilidad con NOAH.

Umbral auditivo automático

El AD229b incorpora una función para determinar automáticamente el umbral auditivo. El procedimiento de prueba se basa en el método Hughson-Westlake (por encima de 5dB arriba, por debajo de 10dB) y cumple con la normativa ISO 8253-1. El usuario podrá seleccionar las frecuencias que desee utilizar en la prueba. Una vez completada la prueba, se podrán obtener los resultados de la memoria del AD229b o enviar a un ordenador para guardarlos en una base de datos o imprimirlos.

ABLB / Stenger

Además de realizar la prueba ABLB programada previamente, el AD229b también puede realizar la prueba Stenger con tonos puros para evaluar la simulación de la enfermedad o actuar como una prueba de habla binaural con una señal vocal monofónica.

Funcionalidad de campo libre

Se pueden presentar el habla y los tonos puros bajo condiciones de campo libre. El sistema disponible abarca desde los 90 dB SPL hasta los 115 dB SPL y ha sido médicamente aprobado. Para la conexión a una cabina insonorizada también se encuentra disponible un conjunto de paneles de conexión AFC8. Para más detalles, consulte con su distribuidor local.



Maletín de transporte rígido

Pruebas vocales y comunicación

Gracias al micrófono con cuello de cisne incorporado, resulta sencillo realizar las pruebas vocales en directo.

También se podrán conectar reproductores de CD o cintas.


La función de recepción vocal se ofrece para instalaciones de campo de sonido.

La función de transmisión vocal está disponible utilizando el micrófono integrado. La intensidad se ajusta fácilmente en el panel frontal.

La monitorización puede realizarse a través de los auriculares del operador o bien a través del altavoz monitor integrado.

Otras características

- Enmascaramiento sincronizado
- Incrementos de 5dB y 1dB
- Dos salidas de campo libre

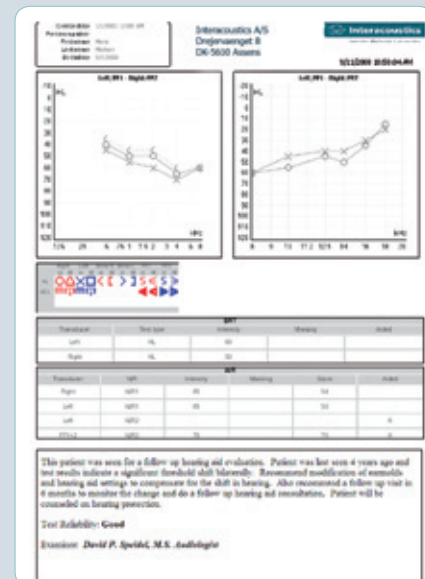

Diseño de impresión de Diagnostic Suite

Integración de PC

El audiómetro ofrece una integración del PC al usar el software Diagnostic Suite Windows® para realizar transferencias de datos audiométricos al PC.

El paquete de diagnóstico posee, entre otras, las siguientes características:

- Transferencia de datos audiométricos
- Asistente avanzado de formato de impresión
- Informes personalizados y combinados
- Informe avanzado
- Tratamiento de paciente y sesión
- Editor de símbolos de audiograma
- Integración total de la base de datos: Compatible con Noah y OtoAccess™



Diagnostic Suite software



Pruebas

- Prueba automática de umbral auditivo Hughson-Westlake (según las normas ISO 8253-1 u OHSa)
- ABLB
- Stenger de tono puro y vocal
- Conducción aérea y ósea
- Pruebas de campo libre

AD229b

- Puesta en funcionamiento versátil del instrumento
- Integración con el ordenador para imprimir, almacenar, compartir y ajustar el audífono
- Solución rentable para aquellos médicos que necesiten un audiómetro con las mejores prestaciones



Interacoustics®

leading diagnostic solutions

Especificaciones técnicas

Intensidad:	AC: -10 a 120 dB HL en pasos de 1 o 5 dB. BC: -10 a 80 dB en pasos de 1 o 5 dB
Rango frecuencial:	125 - 8.000 Hz
Entrada:	tono, tono Warble 5%, 5 Hz (modulación real de frecuencia de onda sinusoidal), cinta/CD, micro
Estímulo de enmascaramiento:	Selección automática de ruido de banda estrecha o ruido blanco para la presentación de tonos y ruido vocal para la presentación de habla.
Salidas:	izquierdo, derecho, óseo D+I, auricular insertor de enmascaramiento, FF1, FF2.
Transmisión vocal:	Micrófono de transmisión vocal integrado. 0 - 110 dB SPL continuamente ajustable en el panel de funcionamiento.
Monitor:	Salida de cinta o CD por medio de un altavoz integrado o por medio de un auricular o altavoz externos.
Presentación de tono:	manual o inversa. Impulso único. Impulsos múltiples de 250-5.000 milésimas de segundo encendido/apagado.
Selección de frecuencia:	Se podrán elegir libremente 125 Hz, 250 Hz, 750 Hz, 1.500 Hz o 8 kHz
Pruebas especiales/batería de pruebas:	ABLB. Stenger. Stenger vocal. Umbral auditivo automático.
Pantalla:	Pantalla alfanumérica.
Ejemplos de software compatible con Windows®:	Diagnostic Suite para integración de PC (compatible con OtoAccess y Noah)
Alimentación:	UPS400 externa (incluida). 100 - 240 V
Consumo:	60 VA
Dimensiones y peso:	(L x An x Al): 36 x 26 x 10 cm / 14 x 10 x 4 pulgadas. Peso: 1,8kg/4,0 lbs. (fuente de alimentación externa UPS400 + 0,8/1,8 lbs.)
Normativas:	IEC 60645-1, ANSI S3.6, Tipo 2. Vocal: IEC 60645-2/ANSI S3.6 Tipo B o B-E. Seguridad: IEC 60601-1, Clase 1, Tipo B. ECM: IEC 60601-1-2
Marca CE médica:	Sí
Piezas incluidas:	Auriculares audiométricos TDH39 Vibrador de conducción ósea B71 Pulsador de respuesta de paciente APS3 Fuente de alimentación externa UPS400 200 fichas de audiograma AF12, 3 bolígrafos Cable de alimentación. Funda CD con manual de instrucciones, Instrucciones multilingües de uso de la CE
Piezas opcionales:	Carcasas sonorreductoras Amplivox 21925 Auriculares sonorreductores Peltor 50250 (se proporcionan sin coste adicional) Maletín de transporte ACC25 Auriculares insertores audiométricos EARTone5A Auriculares audiométricos HDA200 Juego de auriculares insertores CIR22 para enmascaramiento o monitorización Cable USB para ordenador UCA40 Cable para conexión en serie al ordenador IFC69 (9 conectores) Micrófono receptor EM400 Auriculares de monitor MTH400 Auriculares de monitor con micro MTH400M Botones de pulsación en lugar de rotación Diagnostic Suite Software Base de datos OtoAccess™ de Interacoustics

Puntos de venta y servicio:

Interacoustics A/S

Phone: +45 6371 3555 · Fax: +45 6371 3522

E-mail: info@interacoustics.com

DK-5610 Assens, Denmark

Web: www.interacoustics.com

Otros audiómetros:

- Audiómetro pediátrico PA5
- Audiómetro de screening AS608/AS608e
- Audiómetro de diagnóstico AD226
- Audiómetro de diagnóstico AD229e
- Audiómetro clínico AC33
- Audiómetro clínico AC40
- Audiómetro clínico Equinox^{2.0}

Audiometría e impedanciometría en un solo equipo:

- Audiómetro - Impedanciómetro AA222



83009503 - 3 - 08/2009

Para más información:

www.interacoustics.com/com/AD229b



Interacoustics®

leading diagnostic solutions